



CLASSIC

MÁSCARA DESCARTÁVEL

Cod. **207816**



+80%
de
Filtração de bactérias



INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

APRESENTAÇÃO	30 máscaras
LARGURA (máscara)	95 mm
COMPRIMENTO (máscara)	177 mm
MEDIDAS CAIXA	453 x 313 x 233 mm
PESO BRUTO	2,447 Kg
COR	Branco
CÓDIGO	207816
CÓDIGO EAN 13	789 60619 7816 6

INFORMAÇÃO TÉCNICA DE EMBALAGENS

MÁSCARAS x CAIXA	720
CAIXA x PALETE	49
CÓDIGO DUN 14	1 789 60619 7816 3

Atende a recomendação da **ABNT PR1002: 2020**

INSTRUÇÕES DE USO:

Lave as mãos com água e Sabão Elite Professional antes de tocar na máscara.	Se necessário, para seu maior conforto, e possível afrouxar a orelha elástica. Coloque os dedos dentro do arco da orelha e os afaste delicadamente. Segure os dedos abertos por alguns segundos. Nunca puxe o arco da orelha, pois poderá danificá-lo.	Segure a máscara pelas orelhas elásticas e posicione-a à altura do nariz.	Passa as orelhas elásticas atrás das orelhas.	Ajuste a máscara à altura do nariz utilizando o clipe nasal e certifique-se de que ela cubra o queixo.	Evite tocar na máscara quando ela estiver colocada.	Retire a máscara removendo as orelhas elásticas de trás das orelhas.	Cortar orelhas elásticas.	Descarte a máscara colocando-a em um saco plástico, fechando-o e jogando-o fora.	Higienize as mãos com Álcool Gel Elite Professional .		